

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Производитель-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня реализации; гарантийный срок хранения 1 год.

7.3 В течение гарантийного срока производитель-изготовитель бесплатно устранит дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

7.4 Производитель-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Рекламации предъявляются производителю-изготовителю в установленном порядке в приложении технически оформленного акта.

8.2 Предложения и замечания о работе изделия направлять по адресу: г. Москва, ул. Журавлева, 1, ИП "Мельников А. В."

9. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Плантограф упакован на _____ для условий хранения ЗИП: ВЗ-В, маркировка упаковки ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78.

9.2 На время хранения плантограф должен быть упакован в упаковку производителя-изготовителя и храниться в закрытых помещениях при температуре от +3С до +15С в упаковке производителя-изготовителя, а в условиях эксплуатации может применяться без упаковки.

9.3 Воздух помещения, в котором хранится плантограф, должен содержать нормальную влажность и не иметь коррозионно-активных примесей.

ИНДИКАЦИЯ 1

ИЗМ. _____



ПЛАНТОГРАФ


ИПРИЯН ИССЕРПРЮКТЕ

Планер

ИНАТЪКЪИ ТЪИРИМЪИ И ИРИЗЪИИ ВЪТЪКЪИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Пластиграф предназначен для получения изображения площади стопы.

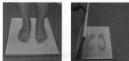

1.2 Пластиграф выпускается в соответствии с ТУ 9425-168-81894927-2802.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Исходные материалы - стекло органическое ГОСТ 17802-72, параллельная ступа, 12х18х118 ГОСТ 9499-79, алюминий анодированный таблица технологическая ТУ 2253-466-85761784-2002, трикотажная ткань с клеевым покрытием арт.376/160 (376-228) или ткань льняная ГОСТ 2665-77, соответствующая ГОСТ Р ИСО 10993-99.

2.2 Габаритные размеры: 448 x 375 x 19,6 и 0,5мм.
2.3 Масса пластиграфа - 2,1 ± 0,1 кг.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

• Пластиграф	- 1 шт.
- Валичок	- 1 шт.
- Листы	- 1 шт.
- Паспорт	- 1 шт.
- Этимология	- 1 шт.
- Бумага А3	- 50 лист.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1 Провести раскорморное-комплекты, его осмотр и проверку комплектности поставки в.3.
- 4.2 Между правой и левой для каждого-большего делится выключаются чистый или бумажный (лучше - белый) размерами 40х30 см.
- 4.3 При нанесении валика (или губки) на поверхность должна быть нанесена слой пластиграфной или эпоксидной краски.
- 4.4 Перед каждым использованием пластиграфа и в процессе дальнейшей эксплуатации поверхности, валика пластиграфа должна быть подтверждена дезинфекция методом двукратной протирки салфеткой, смоченной трифтороуксильной раствором спиртово-водорода. При температуре не менее +18С) и с интервалом между протирками - 15 минут по ГОСТ 40-21-2-85.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пластиграф устанавливается на стол. Большой укладывается и ставит свои стопы на валику по оси пластиграфа. После этого большому разрешает медленно подняться (из сидя с ноги) и равномерно упереть на обе стопы. В таком положении производится обвод стопы карандашом. Большой лист медленно укладывается и убирает ноги с валика. Затем отрываем руку пластиграфа и выкладываем лист бумаги с отпечатком стопы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пластиграф соответствует требованиям технической документации и приемки годным для эксплуатации.

